

Comment mettre, utiliser et enlever UN MASQUE ?

Avant de mettre un masque :



Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



S'assurer que le masque ait bien été lavé suite à une précédente utilisation



Tenir le masque sur l'extérieur



Passer les élastiques (ou liens), sans les croiser, de part et d'autre des oreilles



Abaisser le bas du masque sous le menton. Veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage



Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte

Quand on porte un masque :



Éviter de le toucher



Ne pas déplacer le masque ; chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique



Si besoin de boire ou de manger, changer de masque



Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque

Pour retirer le masque :



Si port de gants, les retirer



Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques



L'enlever en tenant les élastiques sans toucher la partie avant du masque



Placer le masque :
- Soit pour les masques jetables dans un petit sac en plastique, fermer, puis jeter ce sac dans le sac poubelle
- Soit pour les masques lavables dans la machine à laver



Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique

Comment entretenir UN MASQUE TISSU ?

Quelle est la durée maximale de port du masque tissu ?

Un masque se change toutes les 4h ou lors d'une souillure.



Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.

Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation. À l'apparition de la moindre usure, le masque doit être jeté ; son efficacité risque de ne plus être assurée.

Ce masque a été fabriqué avec un tissu 100% coton certifié.

Il doit être lavé en cycle coton à 60°C minimum et doit être totalement séché.

Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie de lavage.

L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée. Dans ces conditions d'entretien, ce masque est réutilisable entre 20 et 30 fois.



Jeter un masque tissu

Les masques doivent être jetés dans une poubelle munie d'un sac plastique.



Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.